


MALADIE DE LA PEYRONIE

La maladie de La Peyronie est une pathologie acquise caractérisée par une fibrose, c'est-à-dire la formation d'une plaque fibreuse rigide au niveau de l'albuginée des corps caverneux, entraînant une déformation pénienne en érection. Cette plaque limite l'expansion d'un côté des corps caverneux. Elle cause une courbure, une déviation et, parfois, un raccourcissement ou un amincissement du pénis, voire une échancrure sur le pénis. Elle entraîne des douleurs et complique les rapports sexuels. Ces derniers pouvant même devenir impossibles.

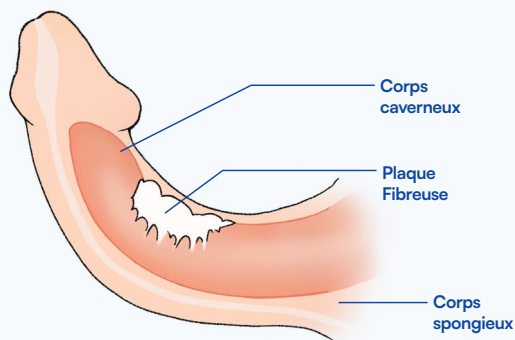

La maladie de la Peyronie
touche environ

5% à 9%

des hommes

principalement **après 50 ans**



**Pourquoi il est
important d'agir :**

Une prise en charge précoce permet de limiter l'évolution de la fibrose, de préserver la longueur pénienne et d'améliorer la fonction. Un traitement adapté retarde et évite même parfois le recours à une opération chirurgicale.

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE,

Un retentissement souvent majeur.

La maladie de La Peyronie a un impact psychologique particulièrement important. La déformation du pénis et les complications sexuelles qui en découlent peuvent générer une atteinte à l'identité masculine et une perte de confiance en soi, entraînant une gêne vis-à-vis du partenaire et une appréhension des rapports.

Beaucoup de patients tardent à consulter par pudeur ou minimisation.

Alors qu'au contraire, le rôle du professionnel de santé est essentiel pour **normaliser la situation et proposer des solutions naturelles et progressives.**

LOGIQUE THÉRAPEUTIQUE ET SOLUTIONS

L'extenseur pénien



L'extenseur pénien applique une traction longitudinale contrôlée sur la verge.


Cette traction favorise un remodelage progressif par adaptation mécanique des fibres. L'objectif est ainsi de réduire progressivement

la courbure du pénis pour maintenir ou améliorer sa longueur et rétablir sa symétrie.




La production des nouvelles cellules se faisant au cours du temps, le temps de port est progressif et adapté selon les recommandations médicales.

L'approche repose sur la régularité et la progressivité.

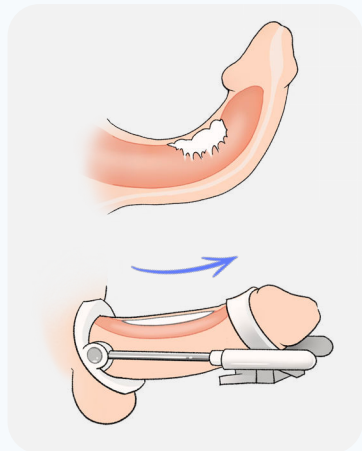

Le vacuum

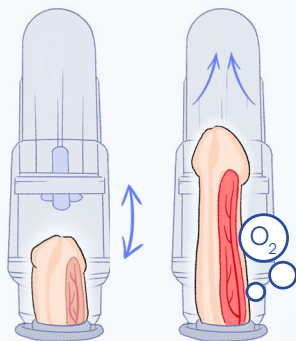

Le vacuum crée une érection par dépression contrôlée, permettant une expansion homogène des corps caverneux. Cette mise en tension douce peut améliorer la souplesse des tissus, limiter la perte de longueur et accompagner certaines phases de la maladie. Selon le stade et la situation individuelle, votre médecin pourra recommander l'extenseur, le vacuum ou leur association.

Utilisation en complément du PRP (Plasma enrichi en plaquettes):

Dans certaines formes de la maladie, des urologues proposent des injections de PRP dans une approche régénérative. Dans ce contexte, le vacuum est parfois recommandé en complément afin d'accompagner la mise en tension tissulaire et de s'inscrire dans une stratégie thérapeutique globale.

Le vacuum existe en deux versions :

- **Rééducation :** 10 minutes par jour permettent de favoriser l'oxygénation tissulaire et d'accompagner la fonction.
- **Activité sexuelle et rééducation :** En plus de l'oxygénation tissulaire quotidienne, cette version permet de maintenir l'érection pendant un rapport sexuel.



Si vous souffrez de la maladie de La Peyronie, **il est essentiel de vous en ouvrir rapidement à votre médecin.** C'est lui qui saura vous accompagner et vous conseiller le dispositif le plus adapté à votre situation.

Solution Urologie se tient également à votre écoute afin de vous éclairer sur les solutions proposées.



SOLUTION UROLOGIE
Pour une meilleure qualité de vie

Dispositifs médicaux pour l'intimité masculine

07 68 37 13 58 | contact@solution-urologie.fr | www.solution-urologie.fr/

**PASSEZ COMMANDE EN LIGNE, PAR TÉLÉPHONE OU
PAR COURRIER :**

- www.solution-urologie.fr
- 07 68 37 13 58
- En renvoyant ce bon de commande



Livraison rapide et discrète
Gratuite à partir de 69€ d'achat



Paiement sécurisé
CB, Chèque, Virement, Paypal



EXTENSEUR



Fast Penis
Extenseur Pro Titane



205 €

LOGIQUE COMBINÉE



PACK
LA PEYRONIE



394 € 334 €

VACUUM



Vacuum VACURECT
Luxe Rx Rééducation



189 €



Vacuum VACURECT
Pro Andrology
Rééducation



229 €

SOLUTION UROLOGIE

49, Allée du Bois Boulard - 57245 JURY

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

N°tel :

E-mail :

le n°tel et l'adresse mail nous permettent de joindre le patient en cas de complément d'informations
nécessaire à l'expédition de la commande

NOM du médecin prescripteur :

Lieu d'exercice :

Spécialité :

Code Postal : Ville :

Paiement par chèque libellé à l'ordre de SOLUTION UROLOGIE

☐

En 1 fois

☐

**En 3 fois sans frais, en joignant 3 chèques
(encaissés à 1 mois d'intervalle)**

*Les 3 chèques doivent-être datés du jour de la commande